

Gebrauchsanweisung: Bitte sorgfältig lesen!

Curafit^{budni}

MEDIZINPRODUKT

Nasenspülsalz

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Was in dieser Gebrauchsanweisung steht

1. Zusammensetzung
2. Zweckbestimmung und Anwendungsgebiete
3. Gegenanzeigen
4. Dosierung und Art der Anwendung
5. Hinweis
6. Nebenwirkungen
7. Nebenwirkungen bei Fehlanwendungen
8. Aufbewahrungshinweise
9. Packungsgröße

1. Zusammensetzung:

100% Natriumchlorid Ph. Eur., enthält keine Konservierungsstoffe und/oder Fließregulierungsmittel

2. Zweckbestimmung und Anwendungsgebiete:

Zur Herstellung einer isotonen Nasenspüllösung zur intensiven und gründlichen Reinigung und Befeuchtung der Nasenschleimhaut

- als vorbeugende und unterstützende Maßnahme bei Erkältungskrankheiten
 - bei vermehrtem Pollenflug
 - bei starker Staub- und Schmutzbelastung
- Für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren.

3. Gegenanzeigen:

Häufiges und starkes Nasenbluten, schwere Verletzungen der Nasenhöhlen mit direkten Verbindungen zu den Flüssigkeitsräumen des Gehirns.

Hinweis für besondere Patientengruppen:

Nasenspülsalz kann bei vorschriftsmäßiger Anwendung sowohl in Schwangerschaft und Stillzeit als auch bei Kindern ab 3 Jahren und älteren Menschen angewendet werden.

4. Dosierung und Art der Anwendung:

Nasenspülsalz wird zur Herstellung einer isotonen Nasenspüllösung angewendet. Dazu wird jeweils der Inhalt eines Beutels Nasenspülsalz in 250 ml warmem Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) gelöst und damit die Nase gespült. Bitte achten Sie auf

die vollständige Lösung des Salzes durch kräftiges Schütteln oder Schwenken, bei nicht vollständiger Lösung kann es zu Reizerscheinungen wie z. B. Brennen oder Kribbeln kommen. Nasenspülungen können bis zu 3x täglich mit je 250 ml Lösung durchgeführt werden. In der Regel empfiehlt sich die Verwendung einer handelsüblichen Nasendusche. Nasenspülungen mit Curafit Nasenspülsalz können bei bestimmungsgemäßem Gebrauch zeitlich unbegrenzt durchgeführt werden.

5. Hinweis:

Das zur Herstellung der Spüllösung eingesetzte Wasser darf nicht wärmer als 50°C sein, muss mindestens Trinkwasserqualität aufweisen und sollte immer frisch sein. Bei besonders exponierten Patienten (z. B. Patienten mit Mukoviszidose (zystischer Fibrose) oder Frischoperierten in den ersten 3 Tagen nach der OP) sowie bei unklarer Trinkwasserqualität soll steriles oder abgekochtes Wasser verwendet werden.

6. Nebenwirkungen:

Gelegentlich kommt es zu Kribbeln und Brennen in der Nase, selten wurden unmittelbar nach Spülbehandlungen auch Kopfschmerzen beobachtet.

7. Nebenwirkungen bei Fehlanwendungen:

Bei unvorschriftsmäßiger Anwendung, insbesondere bei Nasenspülungen mit zu hoch oder zu niedrig konzentrierten Spüllösungen, kann die Nasenschleimhaut gereizt werden oder austrocknen. Bei oraler Aufnahme des Salzes kann es zu Magen- und Kreislaufbeschwerden mit vorübergehender Blutdruckerhöhung kommen.






8. Aufbewahrungshinweise:

Hergestellte Lösungen immer frisch verbrauchen und nie aufbewahren, da Curafit Nasenspülsalz keine Konservierungsstoffe enthält, so dass die Lösungen schnell verkeimen können (mögliches Infektionsrisiko). Das Nasenspülsalz nicht anwenden nach Ablauf des auf der Packung aufgedruckten Verfalldatums. Bitte immer außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

9. Packungsgröße:


Curafit Nasenspülsalz ist in Packungen mit 60 Dosierbeuteln à 2,25 g erhältlich.

Erläuterung der Symbole:

Ph. Eur.	entspricht der Qualität des europäischen Arzneibuches
	die Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie werden eingehalten
	Charge
	verwendbar bis: siehe Boden oder Faltschachtel
	Gebrauchsanweisung beachten
	Hersteller

Vertrieb:

BUDNI Warenhandels-gesellschaft mbH,
22297 Hamburg, www.budni.de
Servicenummer: 040 80 60 30 70

 W&S Pharma GmbH
Rheinzaberner Str. 8
DE-76761 Rülzheim

Stand der Information: April 2021 533753 1 D

